

Forflytning på luftmadras

På luftmadrassen findes en funktion, som anvendes ift. forflytninger og plejesituationer. Madrassen pustes op og bliver hård/statisk, dette for at lette forflytningerne.

Vær opmærksom på, om luftmadrassen fortsat er nødvendig eller om borger i stedet kan benytte vores standard skummadras, der typisk går op til sårgrad 2/3. Det vil være lettere i forhold til forflytninger, både i forhold til borgeren selv, men også for personalet, at borger ligger på standardmadrassen. 😊

OBS, det kan være forbundet med ubehag for f.eks. en dement borger at ligge på et underlag der bevæger sig.

Vi benytter oftest madrassen ProCare Auto samt Zibo Flow Auto fra firmaet ZiboCare A/S.

Drejer det sig om en anden madras, se på vejledningen eller kontakt HMS for at få vejledning om funktionen. Oplys HMI nr.

Pro-Care Auto



Se på vejledningen på madrassen. Se først om "hængelåsen" er låst. Lås op ved tryk på 5 sek. varighed. Tryk herefter på "Max Firm". Madrassen pustes op og bliver hård/statisk på hele fladen. Funktionen slår automatisk fra efter 20 min. Er der ikke behov for 20 min, slås funktionen fra, ved igen at trykke på "Max Firm".

Zibo Flow Auto



Se på vejledningen på madrassen. Se først om "hængelåsen" er låst. Lås op ved tryk på 5 sek. varighed. Tryk herefter på "Pleje". Madrassen pustes op og bliver hård/statisk på hele fladen. Funktionen slår automatisk fra efter 20 min. Er der ikke behov for 20 min, slås funktionen fra, ved igen at trykke på "Pleje".